

Hyo

Klovbeskæring er et must

En grensaks batter ingen steder, når der skal plejes og beskæres klove i soholdet, lyder det fra klovkonsulenten.



Erik Kjærgaard Christensen
18. apr. 2023 kl. 13:57

- Alle har brug for en klovbeskæringsboks til deres sohold. Folk bliver bare først rigtig opmærksomme på det, når de har fået den købt og installeret.

Sådan lyder det fra konsulent Jan Volmer fra firmaet Unitron a/s, der i en årrække har forhandlet klovbeskæringsboksen PiggyTrim til søer.

- Når man først får søerne hejst op, og man stille og roligt kan se de unormale ting på deres klove, får man for alvor øjnene op for nødvendigheden af klovpleje, påpeger han og tilføjer:

- Argumentet for ikke at investere i en klovbeskæringsboks til søer er ofte, at man går rundt med en grensaks. Men det er bare sådan, at klovpleje med en grensaks højst giver en forbedring på klovene på 10 procent.

- Tilmed ved alle, hvor ubehageligt det er at få fingrene i klemme i en grensaks, siger Jan Volmer.



Jan Volmer vurderer, at der er søer i alle besætninger, der har behov for klovbeskæring. Her er der i hvert fald behov for behandling. Foto: Unitron a/s.

Større kuld, men dårligere klove

- Avlsselskaberne har haft en bragende succes med at avle efter frugtbarhed og større kuld, fortsætter han.

- Der er bare en bagside ved den medalje, nemlig at søerne har fået dårligere klove. Det har så ført til, at der er kommet meget mere fokus på søernes klove, også blandt rådgivere, lyder det fra Jan Volmer, som vurderer, at der er søer i alle besætninger, der har behov for klovbeskæring.



maskinbladet

- Inden man investerer i en klovbeskæringsboks, er det derfor vigtigt, at man afsætter tid til klovbeskæringen i ugeplanen. Gør man ikke det, sker det let, at man ikke får det gjort, siger han og fortsætter:

- Når man så har anskaffet en klovbeskæringsboks, skal klovplejen sættes i system. Her er mit råd, at man finder de søer, der trænger til at få beskåret klovene, i farestalden og mærker dem. Så er de lette at finde for de medarbejdere, der skal udføre opgaven.

Skal man gå professionelt til værks her, skal man kigge efter forvoksninger på klove og klovballer, revner i klovranden samt længden på biklovene.



Så er behandlingen overstået, og soen kan bedre stå og gå på benene. Nu kan hun bedre rejse sig og komme hen og drikke, så hun kan producere mælk nok til grisene. Foto: Unitron a/s.

Stop fysiske skader

- Er der påførte, fysiske skader på klovene på nogle søer, skal man finde ud af, om det eksempelvis skyldes et eller andet ved inventaret eller gulvet, og så få det rettet, lyder rådet fra Jan Volmer.

maskinbladet

- Den onde cirkel fortsætter i næste cyklus med mærestatuen, hvor der ses søer, der står og tripper og lægger sig for hurtigt ned, fordi benene er ømme. Så får de for lidt at drikke og producerer for lidt mælk til grisene.

I øjeblikket er der over 100 PiggyTrim klovbeskæringsbokse fra Unitron i brug ude i besætningerne, de fleste i Danmark.



- Når folk går i gang med systematisk klovbeskæring i en sobesætning, er der ekstra mange søer, der trænger til behandling lige i begyndelsen. Men tallet falder normalt markant, når man har været igennem den første runde, siger Jan Volmer. Foto: Unitron a/s.

Det fungerer godt

- Ud fra de tilbagemeldinger, vi får, ved vi, at det fungerer godt langt de fleste steder.

”



- Når folk går i gang med systematisk klovbeskæring i en sobesætning, er der selvfølgelig ekstra mange søer, der trænger til at få beskåret klovene lige i begyndelsen. Men antallet falder normalt markant, når man har været igennem den første runde.

- Folk fortæller om et lavere medicinforbrug i drægtighedsstalden og om, at søerne malker bedre, fordi de i højere grad kommer op og drikker.

Til at overskue

- Når man først har fået klovplejen i sit sohold sat rigtigt i system, er det faktisk ikke så uoverskueligt. Tager man blot 15-20 stykker om ugen i en besætning med 1.000 søer, når man faktisk rigtig langt, pointerer Jan Volmer og tilføjer:

- Med vores klovbeskæringsboks, som er skånsom for søerne og praktisk i brug, kan man typisk nå omkring otte søer i timen.

- Et vigtigt krav, man skal stille til en klovbeskæringsboks til søer, er, at det skal være nemt at få soen ind i den. Desuden skal soen ligge roligt inde i boksen og have den rigtige benstilling. Så er arbejdet med at pleje og beskære soens klove nemt at gå til.



Det tilrådes at placere klovbeskæringsboksen et sted, som er hensigtsmæssigt i forhold til den interne logistik i staldanlægget. Foto: Unitron a/s.

Boksen hæves hydraulisk

Når man har fået soen ind i PiggyTrim klovbeskæringsboksen, hæves hele boksen hydraulisk. Soen ligger nu på langs på en kraftig, langsgående rørkonstruktion med stor diameter med benene ud til siderne.

- Soen falder helt til ro, når hun hejses op, og gulvet forsvinder under hende, fortæller Jan Volmer.

maskinbladet

boksen tages nemlig automatisk, når den er næst op. Det er et lovkrav, at sikkerhedsudstyret tjekkes en gang om året.



Unitron a/s er på det seneste begyndt at eksperimentere med at få folk til at lægge forbindinger på klovbylder og skader på søerne. Det redder nogle søer fra aflivning, så de i stedet kan sendes til slagtning. Foto: Unitron a/s.



Jan Volmers råd er, at man vælger en placering til klovbeskæringsboksen, som er hensigtsmæssig i forhold til den interne logistik i staldanlægget.

- På det seneste er vi begyndt at eksperimentere med at få folk til at lægge forbindinger på klovbylder og skader på søerne, fortæller han og tilføjer:

- Det tegner rigtig fornuftigt, da søer, som man før måtte aflive, nu kan kureres, så de kan sendes til slagting i stedet for at blive destrueret.

- Udover det dyrevelfærdsmæssige aspekt er der således også en betragtelig økonomisk gevinst at hente ved at lægge forbindinger på, påpeger Jan Volmer.