

# PiggyTrim

## - moderne klovpleje

Piggytrim er udviklet til hjælp ved systematiseret klovpleje / klovbeskæring af søer.

Boksen fungerer ved, at man lader soen gå ind i boksen, hvorefter man hæver hende op liggende på maven med benene på hver sin side af det langsgående rør. Soen falder til ro, når gulvet forsvinder under den, og man kan arbejde uforstyrret med klovplejen.

#### NEM BETJENING:

Boksen betjenes ved hjælp af 2 knapper, der er ingen sikkerhedspaler eller lignende man skal huske.

#### PLACERING AF BOKSEN:

Boksen placeres på et hensigtsmæssigt sted i stalden i forhold til den interne logistik.

#### MULIGT FOR INDIVIDUEL TILPASNING:

Der kan medleveres påboltning fod eller nedstøbningsbeslag alt efter ønske. Skal boksen placeres på et spaltegulv, skal den støttes i toppen, typisk ved at bolte den til en mur eller til spærkonstruktionen. Når boksen er løftet helt op, kan man passere uhindret under den, og den er derfor ikke i vejen, hvis den står i et gangareal.

#### BEHANDLINGEN:

Selve klovplejen foregår med énhånds-vinkelsliber påmonteret flapskive og en klovsaks. Behandlingen tager 5-10 min. pr. so.

2 timers  
opstarts-  
kursus



- Skånsomt for soen
- God arbejdshøjde
- Stor frihøjde - kan placeres i gangarealer
- Simpel betjening
- Kun én søjle – giver nem tilgang til soen





## Trinløs vinkelsliber til klovpleje

- Maks. skivediameter: 125 mm
- Spænding: 220V 240V
- Nominelt strømforbrug: 1100W 40W
- Udgangseffekt: 640W
- Rotationshastighedsområde uden belastning: 0-2800 r/min 0-10500 r/min
- Moment: 3 nm
- Gevindiameter på spindel: M14
- Vibrationsniveau: 6 m/s<sup>2</sup>
- Længde 365 mm
- Højde: 113 mm
- Kabellængde: 4 m
- Vægt: 2,1 kg

Varenr.:  
1116-7105



## Sikkerhedsbrille "Crackerjack"

Klar, ridsefast, dugfri.  
God komfort og fin pasform  
til alle ansigter med flade og  
bøjelige brillestænger  
EN 166 1 FT, EN 170.

Varenr.: 1312-5070



## FFP2 Maske med ventil 10 stk.

Dolomitestet. Komfort:  
Skålform. Udåndningsventil  
for lav udåndningsmodstand.  
Justerbar næseklemme for  
optimal pasform.

Varenr.: 1311-2355



## Metalhandske til klovpleje

Kan bruge på både venstre og højre hånd.

Str. Medium:

Varenr.: 1116-7301

Str. XL:

Varenr.: 1116-7302



## Piggy Tar spray 400 ml 12 stk. pakket

- Kan sprøjtes på våde og fugtige  
klove, da tjæren fortrænger væske.
- Den er ekstrem vedhæftende og  
dermed en god beskyttende sårpray.
- Optimal til brug under klovbeskæring.

Varenr.: 1116-1803



## Piggy Pro bandage 9 cm x 6 meter

Blå. 12 stk. pakket.

Varenr.: 1116-1681



## Piggy Salicylic Care Paste 300 ml

Bruges ved klovbeskæring som desinfektion  
under vat og bandage.  
Den effektive vedhæftning og desinfektion  
gør den også velegnet til behandling af  
skuldarsår under skulderkappen til søer.


Varenr.: 1223-0233



## Piggy hoof disc True grit

- Beskæringsskive belagt med tungsten
- Hurtig beskæring og meget lang levetid
- Kan bruges på både våde og tørre klove
- Ingen støv eller lugt
- Velegnet til enhånds vinkelsliber
- Ø115 mm med 22.23 mm hul

Varenr.: 1116-1207

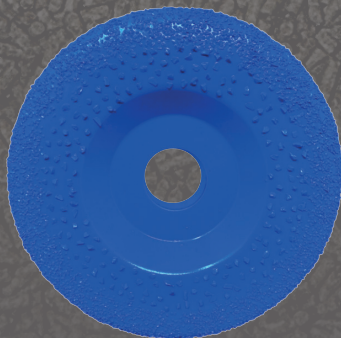

## Piggy Lanolin Spray 250 ml 12 stk. pakket

Et naturprodukt baseret på lanolin som gør  
den ekstremt vedhæftende og derved er meget  
beskyttende for uden i et staldmiljø.

Varenr.: 1116-1804



## Piggy Care Starter Kit til 50 søer

Behandlingspakke til 50 x sår  
på ben og klove.

- Bandager
- Vat plader
- Salicylic Care Paste
- Lanolin spray
- Pistol

Varenr.: 1116-1692

